

# Wasch - und Pflegeanleitung

**Alle Mund-Nase-Masken dürfen nicht geschleudert werden und sollten nicht in den Trockner (es ist Draht vernäht)**

## Baumwoll- Maske

Bis 95° kochfest, Weichspüler möglich

## Outdoor- Maske

Mit Desinfektionsmittel (z.B. Flächendesinfektionsmittel) abwischbar

Bei 30° waschbar in der Maschine, kein Weichspüler

➔ So behalten sie ihre wasserundurchlässige Eigenschaft

Bei 70° mit einer Schüssel Wasser für 10 min. in den Ofen

➔ So behalten sie ihre wasserundurchlässige Eigenschaft

Bei 60° waschbar in der Maschine, kein Weichspüler

➔ Verlust der wasserundurchlässigen Eigenschaft

## MediStoff- Maske

Mit Desinfektionsmittel (z.B. Flächendesinfektionsmittel) abwischbar

Bis 95° kochfest in der Maschine, kein Weichspüler, kein Schleudern, kein Trockner